

ATBM® – Автоматизированная картография всего тела



Стандарт совершенства в ранней диагностике рака кожи


Меланома часто возникает совершенно неожиданно и без какой-либо предыстории. Именно поэтому стандартизованная фотография всей поверхности тела в сочетании с дерматоскопическим анализом является наилучшим методом комплексного мониторинга пациентов с высоким риском развития рака кожи. Полностью автоматизированная система FotoFinder **bodystudio ATBM** – это совершенно уникальный стандарт, предлагающий пациентам намного больше того, что обычно включает в себя простой осмотр кожи. Система эффективно контролирует всю поверхность кожи тела и следит за динамикой каждого отдельного новообразования.

Полная картография тела с исключительной быстротой

Видеодерматоскоп "FotoFinder **bodystudio ATBM**" производит стандартизованное документирование всей поверхности тела за минимальное время – не более 3-5 минут. Для получения фотографий всей поверхности тела пациента системе нужно сообщить только величину его роста, а фотокамера перемещается и производит съёмку автоматически. С помощью технологии FotoFinder **SmartMatch** система создаёт изображения высокого разрешения для каждой из четырёх сторон тела, включая ладони рук и подошвы ног.



Мы определяем мировой прогресс в получении и анализе изображений кожи

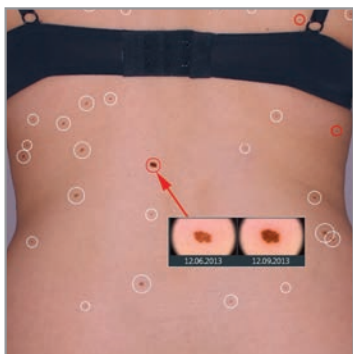

Сочетание картографии тела с дерматоскопией

Видеодерматоскоп "FotoFinder **bodystudio ATBM**" – это уникальное сочетание картографии новообразований с их дерматоскопическим анализом. Все обнаруженные на снимках новообразования регистрируются с уникальным номером, а их микрофотоснимки автоматически привязываются к соответствующим маркерам на карте тела. Программа **Moleanalyzer** выдаёт результат анализа новообразований с общим баллом, позволяющим судить о степени злокачественности. Клинически подтвержденные показатели чувствительности достигают при этом 86%, а специфичности 83%.

Автоматизированный мониторинг на рак кожи



Пациенты с высоким онкологическим риском должны проходить клинический осмотр раз в три месяца. При каждом посещении делаются повторные снимки. Точное позиционирование пациента во время съёмки обеспечивают специальный коврик и лазерный указатель. Программа FotoFinder **Bodyscan ATBM** автоматически сравнивает первичные и повторные снимки, идентифицируя новые или изменившиеся новообразования.

Максимальная гарантия точности результатов




Процедуры, выполняемые с помощью видеодерматоскопа "FotoFinder **bodystudio ATBM**", легко вписываются в ежедневный рабочий график. Они предельно упрощают задачу получения фотографий всей поверхности тела и во много раз уменьшают затраты времени на эти операции. Полностью автоматизированная система видеодерматоскопии "FotoFinder **bodystudio ATBM**" – это неоценимая поддержка вашей профессиональной деятельности!

FotoFinder расширяет сферу применения документирования патологий кожи

Экспертная программа **PASlvision** позволяет произвести фотодокументирование псориаза и вычислить индекс PASI (Psoriasis Area and Severity Index, Индекс распространения и тяжести псориаза). Эта программа значительно расширяет сферу применения FotoFinder **bodystudio ATBM** в практике дерматологии.

Очевидные преимущества системы:

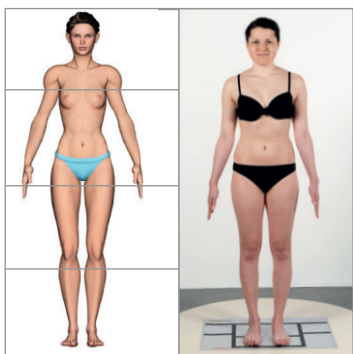

- стандартизованное документирование всей поверхности тела,
- стойка с автоматическим управлением работы фотокамеры,
- лазерный указатель для точного позиционирования пациента,
- **Bodyscan ATBM** демонстрирует изменения немедленно,
- уникальное качество дерматоскопии в режиме Full HD,
- программа **Moleanalyzer** с подсчётом балла, указывающего на степень злокачественности,
- программа **PASlvision** для документирования псориаза,
- содержательные отчёты для пациентов,
- работа в локальной сети клиники.

11/2016

